

Software medico per l'Agopuntura

Nuova Versione AGO-D V 4.1 per tutte le piattaforme Windows.



Assiste nella diagnosi, compara i sintomi, propone le terapie ed ha integrata una nuova funzione di Consulto Rapido.

Dizionario sintomi integrato.

Permette anche di fare Esercitazioni e tenere traccia sia dei Files Pazienti che di quelli delle vostre Esercitazioni.

Dopo notti insonni nel tentativo di conciliare la logica clinica, quella informatica ed, appunto il sonno, è nato **AGO, sistema esperto di MTC** che prevede l'inserimento di sintomi espressi in forma semplice e comprensibile per ottenere, alla fine, la più verosimile diagnosi, fra 358 sindromi di MTC contenute nel programma, secondo un indicazione probabilistica.

L'operatore può confrontare la propria diagnosi con quella suggerita dal sistema ed integrare i sintomi introdotti con ulteriori altri. A questo scopo ho scelto il metodo colloquiale per dialogare con il computer, più che una rigida "strada guidata". Per ciascuna sindrome si può visualizzare inoltre la relativa scheda di terapia.

Oggi AGO è stato aggiornato ed integra in modo completo la gestione dei pazienti tenendone la storia completa sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Tutto ciò che il medico opera con la procedura viene scritto (a richiesta) sul file del paziente e può essere consultato e stampato in momenti successivi. E' un grande valore aggiunto che permette al medico di costruire casistiche personali, operare confronti, studiare nuove forme diagnostiche e di autocheck. Ecco perché reputo questo programma molto utile anche sotto puramente istruttivo del medico agopuntore.

Sono state aggiunte anche funzioni di Esercitazioni l'aspetto e per dar modo al medico di comporre e studiare propri esercizi diagnostici.

E' stata inoltre aggiunta una funzione di Consulto Rapido particolarmente comoda per avere velocemente appunto un consulto diagnostico da parte di AGO proprio come fosse un collega.

Con gli attuali computer a clock elevato, i tempi di risposta alla diagnosi sono praticamente immediati. Va da sé che qualsiasi sistema esperto applicato alla medicina mai sostituirà intuizioni, esperienze e capacità personali del medico. Questo programma vuole comunque proporsi al medico come un valido aiuto e verifica nella diagnosi e nella rivisitazione di casi complessi nonché servire anche agli studenti di MTC per esercitarsi in modo critico.

Questa presentazione cercherà di illustrarvi AGO in modo semplice e consequenziale, non esitate comunque a contattarmi per chiarimenti o ordini: riseb@libero.it

AGO viene distribuito corredato con il Manuale d'Uso e il Dizionario dei Sintomi. Il modulo d'ordine si può scaricare dal Sito internet nella stessa pagina da cui avete scaricato questa presentazione.

Nota: premere sempre Invio o un tasto qualsiasi per passare alla slide seguente come illustrato nelle caselle gialle bordate in nero come quella accanto .

Invio per la slide seguente

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Come si presenta AGO

Lo schermo di ingresso

Ago-D V 4.1 Password

AGO-D V 4.1 for Windows platform (TM)

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata - Dizionario Sintomi Integrato

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD,CA
Via Cavallini 15 27100 Pavia Italy
Tel / Fax ++39(0)382 29732
Email: riseb@libero.it

Dizionario Sintomi integrato

Licenza d'uso

Dr. Rizzo Sebastiano

Digitare la Password e fare Click su Start o premere Invio

 **Start**

Chiudi il Programma

Il Sistema Esperto che Vi assiste nella diagnosi e terapia in Agopuntura. Il collega virtuale con cui consultarsi.

Qui apparirà il nominativo dell'acquirente.

Si digita la password personale e si fa Click su Start .

Si accede così al Menu Iniziale

Invio per la slide seguente

AGO-D V 4.1 for Windows platform

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

Lo schermo *Menu Iniziale*

Ago ha 6 funzioni : 2 relative al Paziente, 2 alle Esercitazioni, 1 per il Consulto Rapido e 1 per la Gestione dei Files Pazienti e Esercitazioni.

Al fine di rendere semplice l'uso del programma, è stato assegnato ad ogni gruppo di funzioni o funzione singola una etichetta di percorso colorata che comparirà in alto a sinistra in ogni schermata della funzione.

'Nuovo Paziente' se dovete iniziare il trattamento su un nuovo paziente.

'Paziente in cura' per continuare un trattamento già iniziato.

Percorso Rosso

Lo stesso vale per le Esercitazioni

Percorso Azzurro

Consulto Rapido per una veloce consultazione della propria diagnosi

Percorso Verde

Salvataggio, consultazioni, stampa etc dei file Paziente e Esercitazioni

Percorso Giallo

Chiusura del programma

Analizziamo ora tutte le funzioni partendo da 'Nuovo Paziente'.

Invio per la slide seguente

La funzione

Nuovo Paziente

Invio per la slide seguente

La Funzione **Nuovo Paziente**

Facendo Click su questo pulsante si accede alla funzione Nuovo Paziente.

Si usa per aprire un nuovo File Paziente e procedere per la prima volta alla diagnosi.

Per le sedute successive useremo invece il pulsante Paziente in Cura ed apriremo il file relativo al paziente che andremo a trattare.

Immaginiamo ora di fare Click su Nuovo Paziente. Apparirà lo schermo Dati Anagrafici / Informazioni

Invio per la slide seguente

Menu Iniziale Licenza d'uso : Dr. Sebastiano Rizzo

Nuovo Paziente	Nuovo Paziente Attiva la cartella di un nuovo Paziente. Esegue la Procedura diagnostica Memorizza i risultati nel File del Paziente (cartella).
Paziente in Cura	Paziente in Cura Apre la cartella di un Paziente in cura. Prosegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati aggiungendoli al File del Paziente (cartella) selezionato.
Esercitazioni	Apri una Nuova Esercitazione Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Il nuovo esercizio può essere memorizzato per future consultazioni.
Esercitazione Esistente	Apri una Esercitazione Esistente Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Apre un esercizio esistente per aggiornamenti e studio.
Consulto Rapido	Consulto Rapido Diagnostica diretta per una rapida consultazione. Questa Funzione non memorizza alcun dato.
Gestione Files	Gestione Files Pazienti o Esercitazioni Salvataggio / ripristino dei File Paziente o delle Esercitazioni. Display, stampa, salvataggio di singoli File del Paziente o Esercitazioni.
Chiudi	Termina il Programma

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

La funzione **Nuovo Paziente**

Lo schermo *Dati Anagrafici*

L'etichetta rossa del percorso Paziente

E' diviso in una sezione prettamente anagrafica ed una di Informazioni dedotte dalla anamnesi .

Dopo averle compilate si fa Click su 'Crea Codice Paziente'

Il Programma assegna un codice al Paziente e lo mostra nel riquadro apposito con il consiglio di comunicarlo al paziente. Servirà per riaprire il suo file nelle prossime sedute.

Anche AGO provvede comunque a tenere traccia dei codici pazienti in un suo archivio . Questo permette di essere in grado di rintracciare sempre i files dei pazienti anche in caso di dimenticanze.

A questo punto con Click su Continua si passa allo schermo Inputs Sintomatologici

Invio per la slide seguente

AGO V 3.0 Dati Anagrafici

Licenza d'uso : Dr. Sebastiano Rizzo

Dati Anagrafici

Cognome (*) : Nome (*) :

Indirizzo (*) : CAP : (*)

Città (*) : Provincia(*) : Stato :

Telefono : Cell. : Fax:

E-mail : Sesso (*) : Età (*) :

Informazioni

A. F. :

A. Fis. :

A. P. R. :

Farmaci :

Note:

<< Torna a Menu Iniziale **Crea Codice (File) Paziente** Codice assegnato al Paziente: Continua

Comunicare il Codice al Paziente

Note sul sintomo

Lo schermo Inputs Sintomatologici ha 20 doppi campi ove digitare i sintomi partendo sempre dal primo campo in alto a sinistra. Per spostarsi al secondo campo o alla riga successiva si batte il tasto Tabulazione. Ogni doppio campo può ospitare una o due informazioni e ciascuna informazione può essere seguita da una & più il simbolo dell'eventuale attributo. Il tutto deve concorrere logicamente ad individuare il sintomo (o i sintomi).

Il sintomo è per noi un insieme di informazioni espresse in modo semplice, intelligibile e logico. Lo possiamo pertanto "sezionare" nelle sue possibili componenti, cioè informazioni, che sono :

- Manifestazione** : ciò che il paziente riferisce o che è obiettivabile;
- Struttura/Funzione** : grossa struttura o funzione interessata;
- Sede** : sede o localizzazione particolare della struttura;
- Carattere** : carattere della manifestazione;
- Modalità** : fattore o circostanza per cui la manifestazione si presenta;
- Attributo** : lettera o simbolo posto accanto ad una delle caratteristiche suddette.

Nella slide che segue sono riportati i due esempi (quello relativo alla funzione Paziente e quello della Esercitazione) proposti poi in questa presentazione .

Invio per la slide seguente

Di seguito l'elenco degli attributi possibili:

- | | |
|---|---|
| A = alto (in senso spaziale, parte alta del corpo) | B = basso (in senso spaziale, parte bassa del corpo) |
| D = destro (in senso spaziale, parte destra del corpo) | S = sinistro (in senso spaziale, parte sinistra del corpo) |
| M = migliora, ama, sta bene con... | P = peggiora, odia, aggrava con... |
| \$ = non migliora con... | * = non peggiora con... |
| (= prima di... |) = dopo di... |
| + = intenso, abbondante; eccesso di... | - = ridotto, scarso, assente |
| I = Interno | E = Esterno |

AGO analizza i sintomi imputati comparandoli con una serie di dizionari sintomatologici. L'analisi viene condotta in modo intelligente e ponderata riconoscendo:

- i sintomi che hanno un sinonimo,
- i sintomi imputati doppi di cui uno viene automaticamente ignorato (il messaggio di avviso è gestibile dall'utente)
- i sintomi sconosciuti o errati che vengono ignorati (il messaggio di avviso automatico del programma).

Gli esempi

Esempio relativo alla funzione Nuovo Paziente :

Il paziente accusa : "dolore alla testa e alla fronte con occhi rossi, febbre e scolo liquido dal naso ".

Questa sequenza viene così imputata : "DOLORE TESTA, DOLORE FRONTE, OCCHI ROSSI, FEBBRE ,
SCOLO LIQUIDO, NASO “

da cui :

DOLORE	= manifestazione	TESTA	= sede
DOLORE	= manifestazione	FRONTE	= sede
OCCHI	= sede	ROSSI	=carattere della manifestazione
FEBBRE	= manifestazione		
SCOLO	= manifestazione	LIQUIDO	= carattere della manifestazione
NASO	= sede		

Esempio relativo alla funzione Esercitazione :

Nella Esercitazione si è ipotizzato : “ gli arti diventano freddi, la dispnea peggiora sotto sforzo, le labbra diventano blu e la lingua ippallidisce mentre il ritmo del polso diminuisce “.

Sequenza imputata : “ARTI FREDDI, DISPNEA SFORZO&P, LABBRA BLU, LINGUA PALLIDA, POLSO RITMO&-

ARTI	= sede	FREDDI	= manifestazione
DISPNEA	= manifestazione	SFORZO&P	= modalità e attributo della manifestazione
LABBRA	= sede	BLU	= carattere della manifestazione
LINGUA	= sede	PALLIDA	= carattere della manifestazione
POLSO	= sede	RITMO&-	= manifestazione

Invio per la slide seguente

AGO-D V 4.1 for Windows platform

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Nuovo Paziente**

Lo schermo **Risultati della Diagnosi**

Ora supponiamo di fare Click sul primo pulsante Sintomi. Si aprirà lo schermo Sintomi relativo alla prima sindrome.

Invio per la slide seguente

Classifica dei risultati della diagnosi.

Elenco di 9 sindromi con relativo commento e valore dello score probabilistico.

Pulsanti per la visualizzazione :
'Sintomi': dellaSindrome
'Terapia': della Sindrome
'S': tutti i sintomi della Sindrome

Pulsanti per la visualizzazione contemporanea di tutti gli schermi Sintomi e Terapie

Pulsante per la scrittura delle sindromi nel File Paziente

Pulsanti per terminare la diagnosi o continuare la diagnosi richiamando ancora lo schermo Input Sintomatologici ed aggiungere sintomi alla ricerca in corso.

Score	Sindrome e Commento	Sintomi	Terapia	S
I 100	003 FREDDO IN ORGANI POLMONE E IN SUPERFICIE / FEI HAN VENTO-FREDDO PERVERSO ESTERNO IN POLMONE RAGGIUNGE LA SUPERFICIE	Sintomi	Terapia	S
II 99,221	180 MERIDIANO PRINCIPALE DI VESCICA DA CAUSA INTERNA / ZU TAI YANG JING MAI TURBE PSICHICHE/ALIMENTARI/SESSUALI/FISICHE/CONGENITE	Sintomi	Terapia	S
III 97,820	150 SHAOYANG + CALORE NEL SANGUE / SHAOYANG BING RE DU CALORE TOSSICO (INTERNO)	Sintomi	Terapia	S
IV 97,742	149 SHAOYANG CON INTERESSAMENTO DI YANGMING / YANGMING YU SHAOYANG HE BING CALORE PERVERSO A LIVELLO SUPERFICIALE DI SHAOYANG + YANGMING	Sintomi	Terapia	S
V 97,612	151 YANGMING DA CALORE NEL MERIDIANO (STRATO MISTO) / YANGMING RE ZHENG ATTACCO DIRETTO DI CALORE O SECCHEZZA; FREDDO PERVERSO ESTERNO DA TAIYANG	Sintomi	Terapia	S
VI 97,509	144 TAIYANG DA CALORE / TAIYANG BING (RE) CALORE PERVERSO ESTERNO A LIVELLO SUPERFICIALE DEL MERIDIANO	Sintomi	Terapia	S
VII 96,938	152 YANGMING DA CALORE NEL VISCERI (STRATO MISTO) / YANGMING BING ATTACCO DIRETTO DI CALORE/SECCO, FREDDO ESTERNO TRASFORMATO IN CALORE INTERNO	Sintomi	Terapia	S
VIII 96,341	017 CALORE (FUOCO) NEL VISCERE STOMACO / WEI RE WEI ZHONG RE ECCITAZIONE MENTALE; CALORE ESTERNO; ALIMENTAZIONE ECCESSIVA E CALDA/PICCANTE/ALCOL	Sintomi	Terapia	S
IX 94,135	198 MERIDIANO TENDINO-MUSCOLARE DI TENUE DA ECCESSO / SHOU TAI YANG JING JIN SHI ZHENG ENERGIA PERVERSA ESTERNA	Sintomi	Terapia	S

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Nuovo Paziente**

Gli schermi *Sintomi*

I 9 schermi Sintomi vengono aperti contemporaneamente e sovrapposti l'uno all'altro in ordine dalla nona alla prima Sindrome.

Basterà trascinarli spostandoli e si potrà così vedere e compararne i risultati


Pulsante per scrivere i dati dello schermo attivo nel File Paziente

Pulsante per chiudere contemporaneamente tutti gli schermi Sintomi aperti

Pulsante per chiudere il singolo schermo Sintomi

La stessa logica vale per i pulsanti **Terapia**.

Invio per la slide seguente

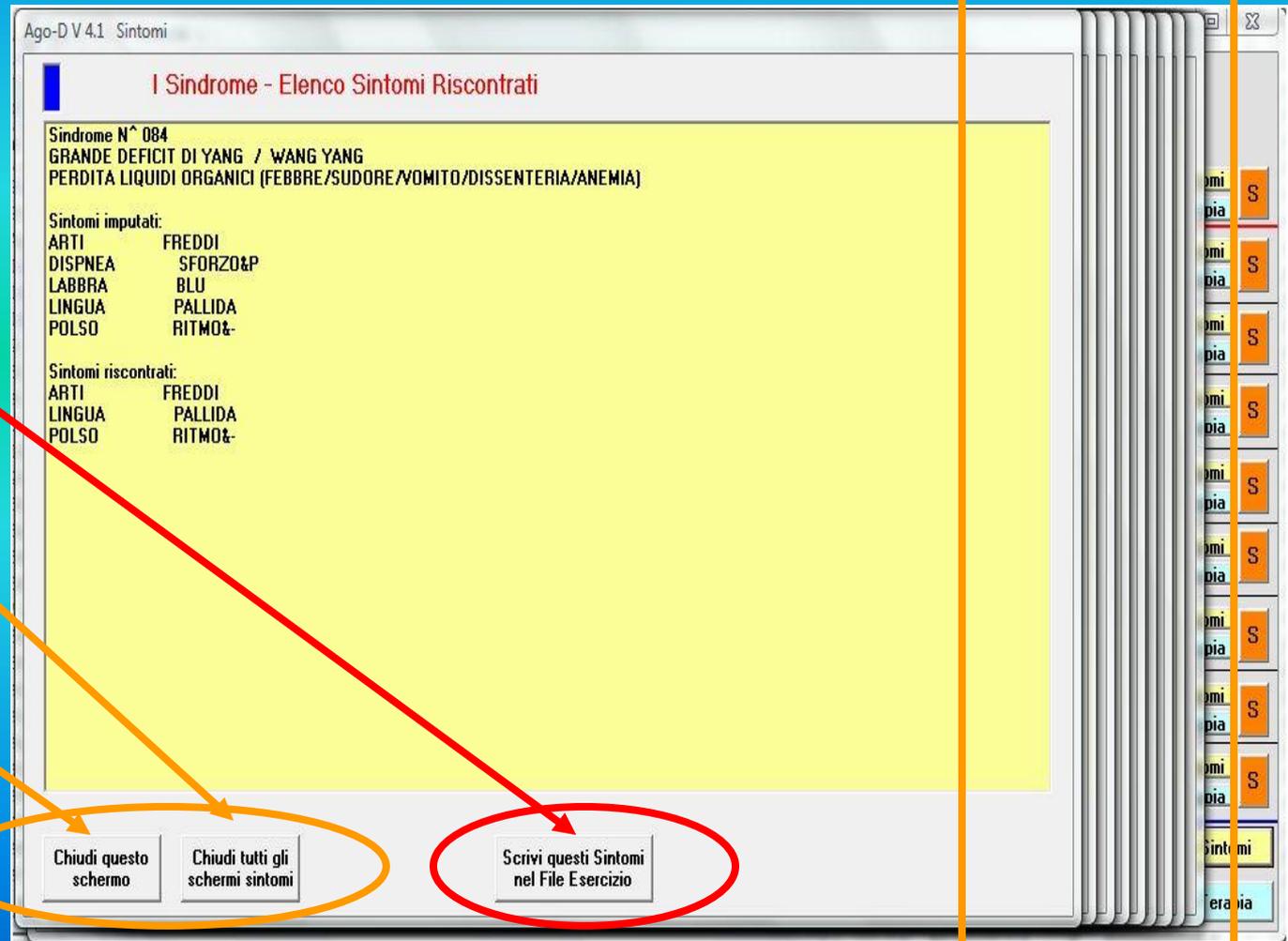

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Nuovo Paziente**
Gli schermi *Terapia*

I 9 schermi Terapia vengono aperti contemporaneamente e sovrapposti con la stessa logica degli schermi Sintomi visti in precedenza.


Basterà trascinarli spostandoli e si potranno analizzare le diverse terapie.

Pulsante per scrivere i dati dello schermo attivo nel File Paziente

Pulsante per chiudere contemporaneamente tutti gli schermi Terapia aperti

Pulsante per chiudere il singolo schermo Terapia

Invio per la slide seguente

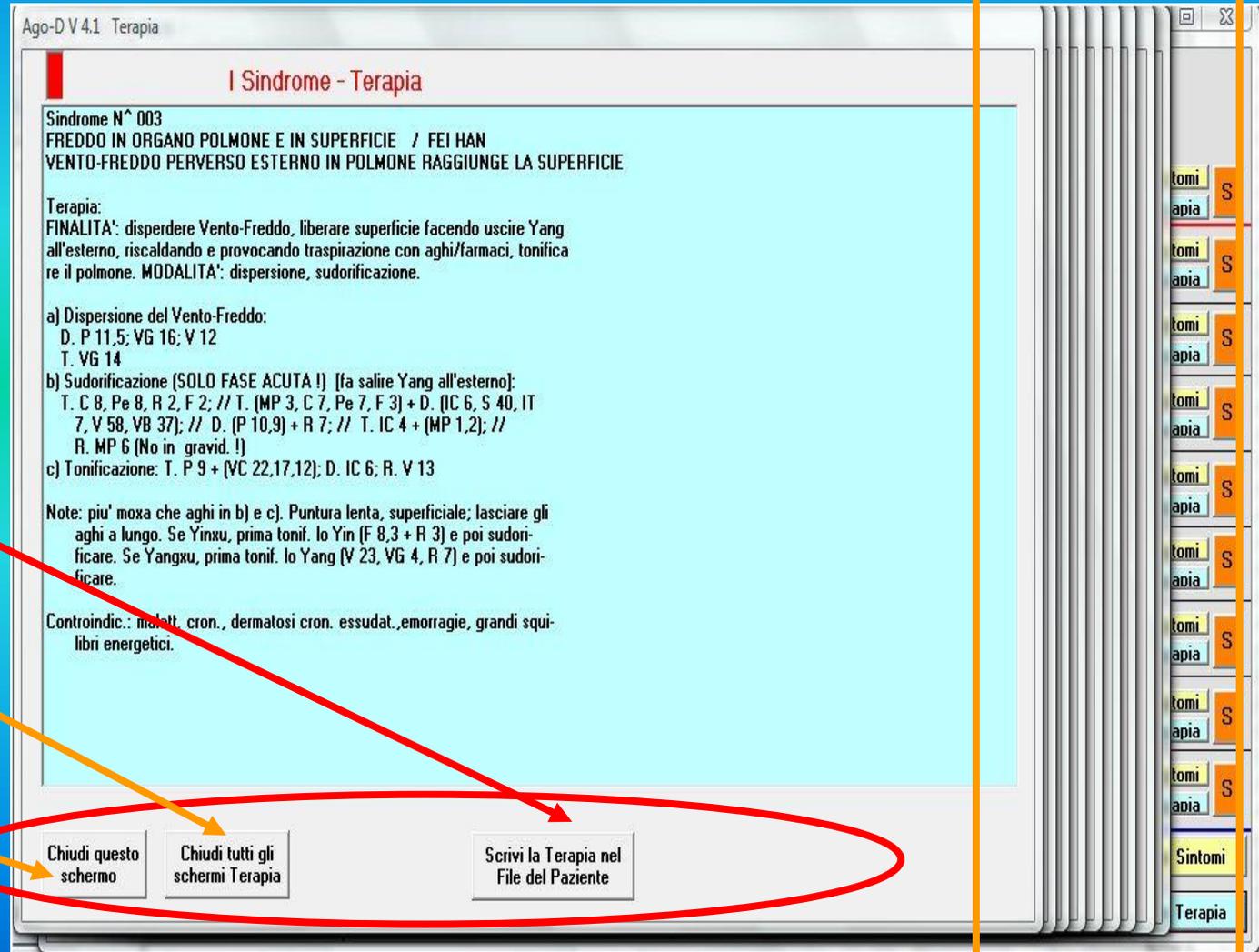

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Nuovo Paziente**

Lo schermo *Risultati della Diagnosi*

Ora supponiamo di fare Click sul pulsante Termina Diagnosi. Si aprirà lo schermo Note per aggiungere proprie note o promemoria relative alla seduta diagnostica corrente.

Invio per la slide seguente

AgO-D V 4.1 Risultati della diagnosi

Licenza d'uso: Dr. Rizzo Sebastiano

Risultati della diagnosi

Score	Sindrome e Commento	Sintomi	Terapia
I 100	003 FREDDO IN ORGANO POLMONE E IN SUPERFICIE / FEI HAN VENTO-FREDDO PERVERSO ESTERNO IN POLMONE RAGGIUNGE LA SUPERFICIE	Sintomi S	Terapia S
II 99,221	180 MERIDIANO PRINCIPALE DI VESCICA DA CAUSA INTERNA / ZU TAI YANG JING MAI TURBE PSICHICHE/ALIMENTARI/SESSUALI/FISICHE/CONGENITE	Sintomi S	Terapia S
III 97,820	150 SHAOYANG + CALORE NEL SANGUE / SHAOYANG BING RE DU CALORE TOSSICO (INTERNO)	Sintomi S	Terapia S
IV 97,742	149 SHAOYANG CON INTERESSAMENTO DI YANGMING / YANGMING YU SHAOYANG HE BING CALORE PERVERSO A LIVELLO SUPERFICIALE DI SHAOYANG + YANGMING	Sintomi S	Terapia S
V 97,612	151 YANGMING DA CALORE NEL MERIDIANO (STRATO MISTO) / YANGMING RE ZHENG ATTACCO DIRETTO DI CALORE O SECCHEZZA; FREDDO PERVERSO ESTERNO DA TAIYANG	Sintomi S	Terapia S
VI 97,509	144 TAIYANG DA CALORE / TAIYANG BING (RE) CALORE PERVERSO ESTERNO A LIVELLO SUPERFICIALE DEL MERIDIANO	Sintomi S	Terapia S
VII 96,338	152 YANGMING DA CALORE NEI VISCERI (STRATO MISTO) / YANGMING BING ATTACCO DIRETTO DI CALORE/SECCO; FREDDO ESTERNO TRASFORMATO IN CALORE INTERNO	Sintomi S	Terapia S
VIII 96,341	007 CALORE (FUOCO) NEL VISCERE STOMACO / WEI REWEI ZHONG RE ECITAZIONE MENTALE; CALORE ESTERNO; ALIMENTAZIONE ECCESIVA E CALDA/PICCANTE/ALCOL	Sintomi S	Terapia S
IX 94,135	198 MERIDIANO TENDINO-MUSCOLARE DI TENUE DA ECCESSO / SHOU TAI YANG JING JIN SHI ZHENG ENERGIA PERVERSA ESTERNA	Sintomi S	Terapia S

Termina Diagnosi Continua Diagnosi

Scrivi nel File Paziente le prime 1 Sindrmi

Mostra tutti gli schermi Sintomi

Mostra tutti gli schermi Terapia

Pulsante per continuare la diagnosi richiamando ancora lo schermo Input Sintomatologici ed aggiungere sintomi alla ricerca in corso.

Pulsante per terminare la diagnosi e andare allo schermo delle Note Finali

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Nuovo Paziente**

Lo schermo *Note*

In questo spazio si possono aggiungere in formato libero e senza limiti di spazio tutte le annotazioni relative alla seduta diagnostica corrente.

Terminata la scrittura, facendo Click su questo pulsante si scrivono le note nel File Paziente e si torna automaticamente al Menu Iniziale da cui si può accedere ad una nuova funzione



La funzione

Paziente in Cura

Invio per la slide seguente

Facendo Click su questo pulsante si accede alla funzione Paziente in Cura.

Si usa nelle sedute diagnostiche successive alla prima.

Invio per la slide seguente

Menu Iniziale Licenza d'uso : Dr. Sebastiano Rizzo

Nuovo Paziente	Nuovo Paziente Attiva la cartella di un nuovo Paziente. Esegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati nel File del Paziente [cartella].
Paziente in Cura	Paziente in Cura Apre la cartella di un Paziente in cura. Prosegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati aggiungendoli al File del Paziente [cartella] selezionato.
Esercitazioni	Apri una Nuova Esercitazione Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Il nuovo esercizio può essere memorizzato per future consultazioni.
Esercitazione Esistente	Apri una Esercitazione Esistente Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Apre un esercizio esistente per aggiornamenti e studio.
Consulto Rapido	Consulto Rapido Diagnostica diretta per una rapida consultazione. Questa Funzione non memorizza alcun dato.
Gestione Files	Gestione Files Pazienti o Esercitazioni Salvataggio / ripristino dei File Paziente o delle Esercitazioni. Display, stampa, salvataggio di singoli File del Paziente o Esercitazioni.
Chiudi	Termina il Programma

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Paziente in Cura**

Lo schermo *Paziente in Cura*

Paziente in Cura apre lo schermo presentando la lista dei pazienti. La sequenza operativa è elencata di seguito.

1) Si evidenzia il paziente interessato.

2) Si seleziona il paziente interessato.

3) Si apre il file del Paziente ottenendone il **messaggio di conferma**

4) Si può ora vedere il File Paziente prima di continuare con lo schermo Input Sintomatologici

5) Oppure andare direttamente allo schermo Input Sintomatologici

Questo pulsante annulla l'operazione e torna al Menu Iniziale

The screenshot shows the 'Paziente in cura' screen. At the top, it says 'AGO V3.0 Paziente in cura'. Below that, 'Paziente in cura' is written in red. A section titled 'Lista Pazienti:' contains a table with 5 rows of patient data. The third row is highlighted. To the right of the table, there are several buttons and text elements: a '>>' button, a text field containing '0403-PAT3', a button labeled 'Apri File Paziente selezionato', a red message 'Aperto File Paziente 0403-PAT3', two 'Continua >>' buttons with sub-labels 'Mostrami prima il File Paziente selezionato' and 'Vai direttamente allo schermo Input Sintomatologici', and a '<< Torna a Menu Iniziale' button at the bottom.

Code	Sex	Address	Name	Address
0403-PAT1	F	Primo	Anna	Via Roma 66
0403-PAT2	M	Secondo	Giacomo	Via Carducci 8
0403-PAT3	F	Terzo	Fabia	Via Lorient 9
0403-PAT4	M	Quarto	Giuseppe	Via Napoli 9
0403-PAT5	M	Quinto	Dario	Via Tonale 6

Immaginiamo di fare click sul pulsante ' Continua >> Mostrami prima il File Paziente selezionato '.

Invio per la slide seguente

AGO-D V 4.1 for Windows platform

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata




Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Paziente in Cura**

La sequenza degli schermi

La logica diagnostica e le opzioni possibili sono le stesse di quelle che avete visto illustrate per la funzione Nuovo Paziente.

La sequenza 1, 2, 3, 4, 5 le mostra nel loro svolgimento.

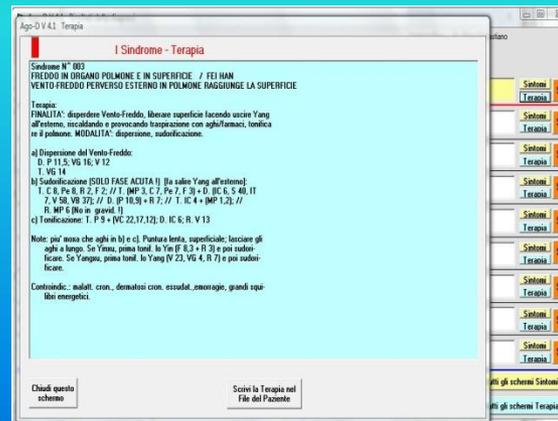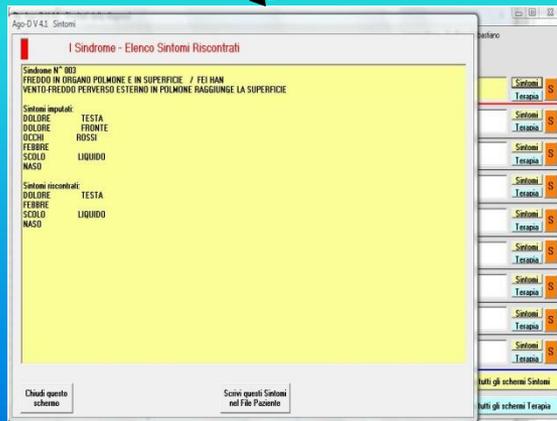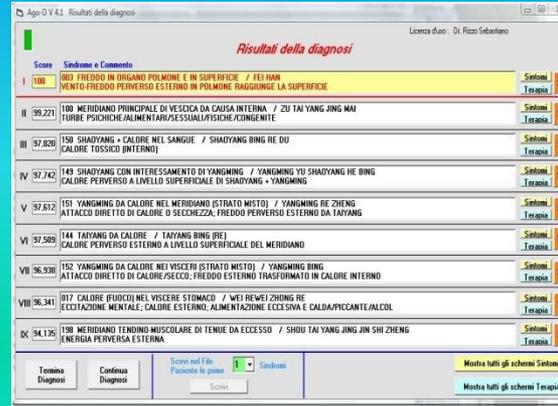

(Si possono ovviamente vedere anche tutti gli schermi Sintomi e Terapia sovrapposti)

La funzione

Esercitazioni

Invio per la slide seguente

La funzione **Esercitazioni**

Ago V 3.0 implementa la funzione Esercitazioni .

Questa funzione permette di condurre esercizi diagnostici personalizzati con finalità di studio e ricerca.

Tutti gli esercizi possono essere memorizzati e richiamati successivamente tramite la funzione Esercitazione Esistente.


Come potrete notare, le finestre delle Esercitazioni avranno tutte una etichetta azzurra.

Aprire una nuova Esercitazione

Percorso Azzurro

Seguiamo ora la funzione Esercitazione.

Invio per la slide seguente

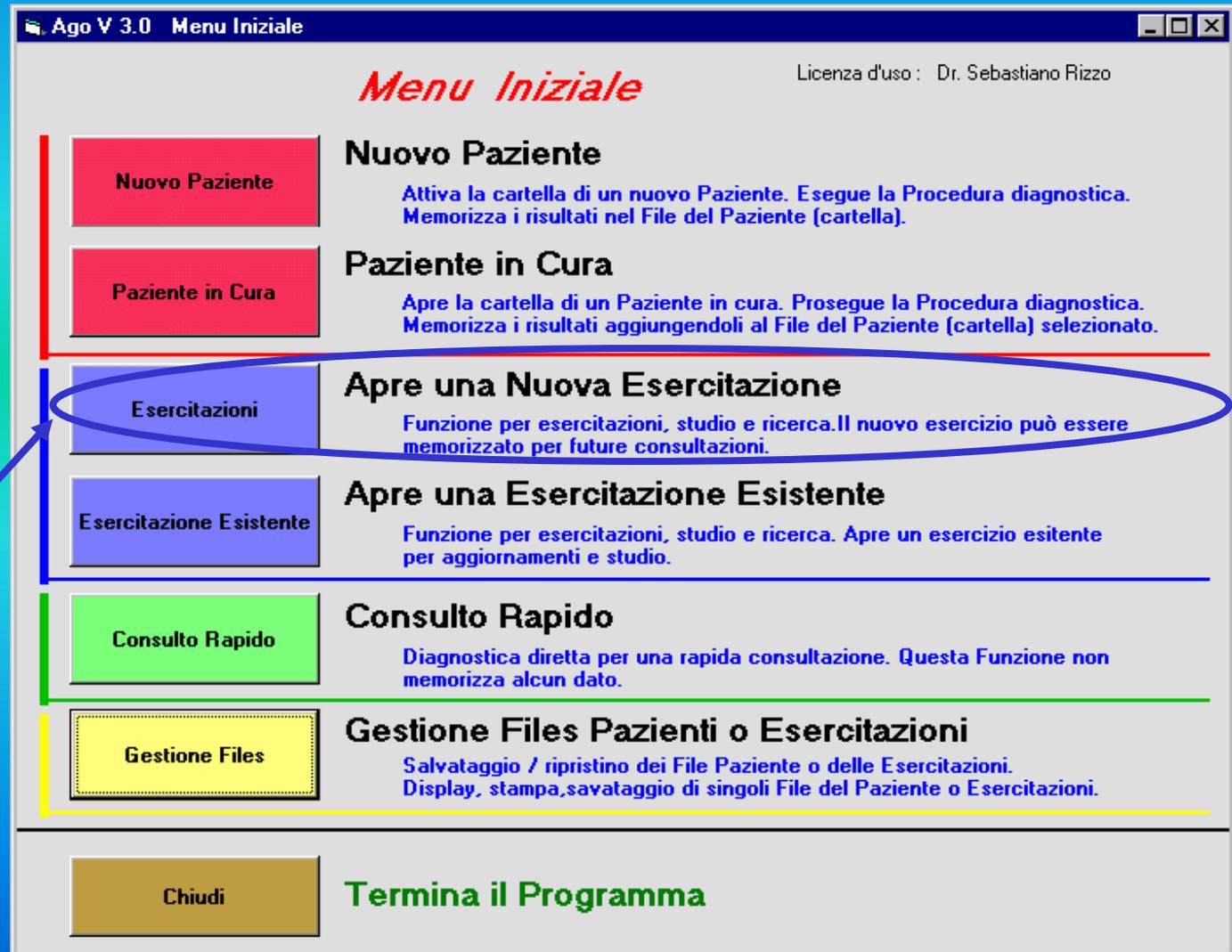

La funzione **Esercitazioni**

Lo schermo *Esercitazioni*

L'etichetta azzurra del percorso Esercitazione

Nella prima sezione si scrive il Nome dell'Esercitazione e la sua descrizione nonché si assegna il sesso.

Nella seconda le Informazioni dedotte dalla anamnesi .

Dopo averla compilate si fa Click su 'Crea Codice Paziente'

Il Programma assegna un codice all'Esercitazione e lo mostra nel riquadro apposito. Servirà per riaprire lo stesso file nelle prossime sedute.

Anche AGO provvede comunque a tenere traccia dei codici esercitazioni. Questo permette di essere in grado di rintracciare sempre i files.

Agg V 3.0 Esercitazioni

Esercitazioni Licenza d'uso Dr. Sebastiano Rizzo

Informazioni

Nome Esercizio / Descrizione (*) Sesso (*) : F

Esercitazione di prova

A. F. : Nota AF

A. Fis. : Nota Afis

A. P. R. : Nota APR

Farmaci : Nota farmaci : nessuno

Note: Prova su soggetto femminile

<< Torna a Menu Iniziale Crea Codice (File) Esercizio Codice assegnato all' esercizio : 0403-ESE8 Continua >>

Codice assegnato

A questo punto con Click su Continua >> si passa allo schermo Inputs Sintomatologici

Invio per la slide seguente

La funzione **Esercitazioni**

Lo schermo **Risultati della diagnosi**

Come per le funzioni Pazienti, i risultati vengono mostrati attraverso l'elenco di 9 sindromi con relativo commento e valore dello score probabilistico.

I pulsanti presenti in questo schermo fanno ovviamente le stesse funzioni di quelli precedentemente visti per il Paziente.

Invio per la slide seguente

Risultati della diagnosi

Score Sindrome e Commento

I	100	084 GRANDE DEFICIT DI YANG / WANG YANG PERDITA LIQUIDI ORGANICI (FEBBRE/SUDORE/VOMITO/DISSENTERIA/ANEMIA)	Sintomi	S
			Terapia	
II	99,654	031 ECCESSO DI SANGUE NELL'ORGANO CUORE (STAGNAZIONE) / XIN XUE YU DEFICIT DI QI DI CUORE + SENTIMENTI; FREDDO ESTERNO; FATICA; MUCOSITA'	Sintomi	S
			Terapia	
III	99,441	104 FREDDO VERO CON SEGNI DI FALSO CALORE (RENE IPERDOMINA CUORE) / ZHEN HAN JIA RE EVOLUZIONE GRAVE DI FREDDO INTERNO (ALIMENTAZIONE/SENTIMENTI/STRESS) O ESTERNO SU DEFICIT DI RENE YANG	Sintomi	S
			Terapia	
IV	76,648	086 INTERNA DA ECCESSO-FREDDO / LI HAN SHI ESAURIMENTO SECONDARIO DI YANG DA ECCESSO DI FREDDO ESTERNO	Sintomi	S
			Terapia	
V	76,462	019 DEFICIT DI YANG NELL'ORGANO MILZA (CON EDEMI) / PI YANG XU ECCESSO DI FREDDO --> CONSUMO DI YANG NELL'ORGANO	Sintomi	S
			Terapia	
VI	76,436	099 CALORE ESTERNO E FREDDO INTERNO CONTEMPORANEI / BIAO RE LI HAN VENTO-CALDO ESTERNO SU FREDDO INTERNO; CONGENITO/IATROGENO (FARMACI RINFRESCANTI)	Sintomi	S
			Terapia	
VII	76,276	121 ECCESSO SANGUE NEI VASI SANGUIGNI DA STASI/COAG.(UTERO FREDDO) / QI ZHI XUE YU QING QIAO BU TONG, BAO GONG BI SAI	Sintomi	S
			Terapia	
VIII	76,25	075 DEFICIT DI YANG NEGLI ORGANI CUORE E RENE / XIN SHEN LIANG YANG XU GRANDE FREDDO-YIN; RISTAGNO DI SANGUE; EDEMI (MALATTIE GRAVI ACUTE/CRONICHE)	Sintomi	S
			Terapia	
IX	76,25	090 FREDDO DIFFUSO / HAN ZHENG / ZHONG HAN / XU HAN/LIENG NI DEFICIT DI YANG; ECCESSO DI YIN; FREDDO PERVERSO	Sintomi	S
			Terapia	

Termina Diagnosi Continua Diagnosi Scrivi nel file Esercizio le prime 1 Sindromi Scrivi Mostra tutti gli schermi Sintomi Mostra tutti gli schermi Terapia

AGO-D V 4.1 for Windows platform


Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Esercitazioni**



Gli schermi *Sintomi e Terapia*

Come per il Paziente, anche la funzione Esercitazione offre la possibilità di vedere:

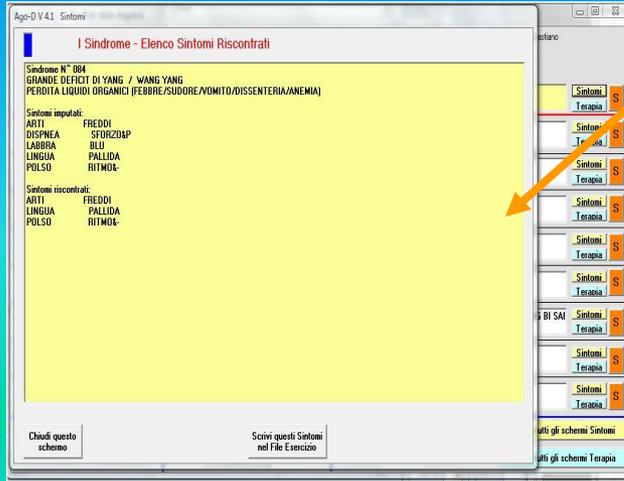


Il singolo schermo dei sintomi relativi ad una Sindrome.

Gli schermi sovrapposti di tutti i sintomi relativi a tutte le 9 Sindromi trovate.

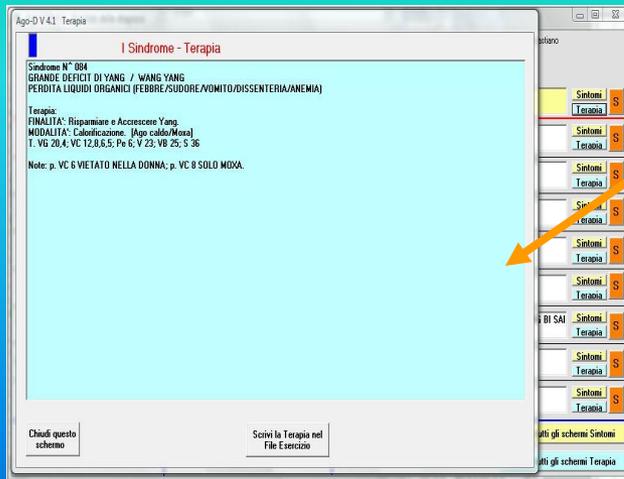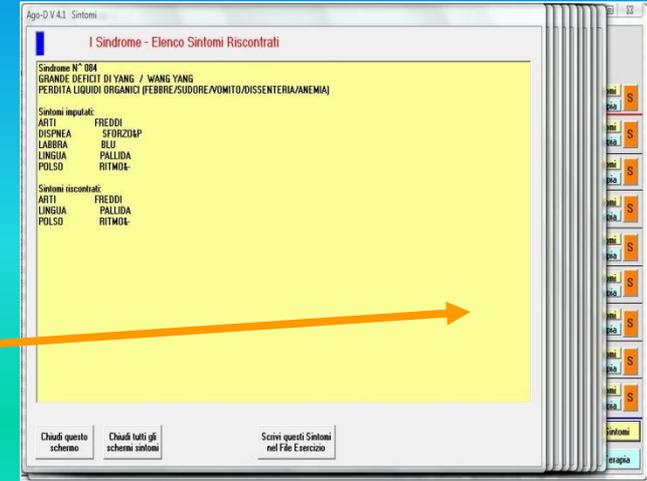

Il singolo schermo della Terapia relativa ad una Sindrome.

Gli schermi sovrapposti di tutte le Terapie relative a tutte le 9 Sindromi trovate.

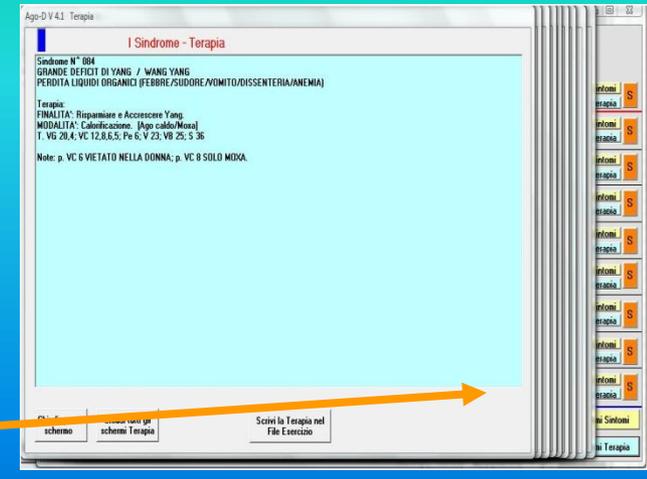

Anche le opzioni (chiusura degli schermi, scrittura nel File Esercitazione) sono le stesse.

Invio per la slide seguente

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Esercitazioni**

Ritorno allo schermo *Risultati della Diagnosi*

Dopo aver visionato gli schermi Sintomi e Terapie ed averli chiusi, il programma torna a mostrare lo schermo dei 'Risultati della diagnosi'.

Possiamo continuare la diagnosi (si avrebbe a disposizione un nuovo schermo 'Inputs Sintomatologici')

oppure terminarla.

Nel caso si decidesse di terminare la diagnosi, il programma proporrà lo schermo Note per eventuali annotazioni finali.

Invio per la slide seguente

Score	Sindrome e Commento	Sintomi	Terapia
I 100	084 GRANDE DEFICIT DI YANG / WANG YANG PERDITA LIQUIDI ORGANICI (FEBBRE/SUDORE/VOMITO/DISSENTERIA/ANEMIA)	S	S
II 99,654	031 ECCESSO DI SANGUE NELL'ORGANO CUORE (STAGNAZIONE) / XIN XUE YU DEFICIT DI QI DI CUORE + SENTIMENTI; FREDDO ESTERNO; FATICA; MUCOSITA'	S	S
III 99,441	104 FREDDO VERO CON SEGNI DI FALSO CALORE (RENE IPERDOMINA CUORE) / ZHEN HAN JIA RE EVOLUZIONE GRAVE DI FREDDO INTERNO (ALIMENTAZIONE/SENTIMENTI/STRESS) O ESTERNO SU DEFICIT DI RENE YANG	S	S
IV 76,648	086 INTERNA DA ECCESSO-FREDDO / LI HAN SHI ESAURIMENTO SECONDARIO DI YANG DA ECCESSO DI FREDDO ESTERNO	S	S
V 76,462	019 DEFICIT DI YANG NELL'ORGANO MILZA (CON EDEMI) / PI YANG XU ECCESSO DI FREDDO --> CONSUMO DI YANG NELL'ORGANO	S	S
VI 76,436	099 CALORE ESTERNO E FREDDO INTERNO CONTEMPORANEI / BIAO RE LI HAN VENTO-CALDO ESTERNO SU FREDDO INTERNO; CONGENITO/IATROGENO (FARMACI RINFRESCANTI)	S	S
VII 76,276	121 ECCESSO SANGUE NEI VASI SANGUIGNI DA STASI/COAG.(UTERO FREDDO) / QI ZHI XUE YU QING QIAO BU TONG, BAO GONG BI SAI	S	S
VIII 76,25	075 DEFICIT DI YANG NEGLI ORGANI CUORE E RENE / XIN SHEN LIANG YANG XU GRANDE FREDDO-YIN; RISTAGNO DI SANGUE; EDEMI (MALATTIE GRAVI ACUTE/CRONICHE)	S	S
IX 76,25	090 FREDDO DIFFUSO / HAN ZHENG / ZHONG HAN / XU HAN/LIENG NI DEFICIT DI YANG; ECCESSO DI YIN; FREDDO PERVERSO	S	S

Termina Diagnosi Continua Diagnosi Scrivi nel file Esercizio le prime 1 Sindrmi Scrivi Mostra tutti gli schermi Sintomi Mostra tutti gli schermi Terapia

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

La funzione **Esercitazioni**

Lo schermo *Note*

Spazio a disposizione per aggiungere in formato libero e senza limiti di spazio tutte le annotazioni relative alla Esercitazione corrente.

Terminata la scrittura, facendo Click su questo pulsante si scrivono le note nel File Esercitazione e si torna automaticamente al Menu Iniziale da cui si può accedere ad una nuova funzione



La funzione

Esercitazione Esistente

Invio per la slide seguente

La funzione **Esercitazione Esistente**

Lo schermo *Menu Iniziale*

Come la funzione Paziente in Cura permetteva di accedere ai files dei pazienti in trattamento, così la funzione Esercitazione Esistente accede alle esercitazioni già fatte per consentirne la consultazione o la continuazione.

Aprire una Esercitazione Esistente

Percorso Azzurro



Menu Iniziale Licenza d'uso : Dr. Sebastiano Rizzo

Nuovo Paziente
Attiva la cartella di un nuovo Paziente. Esegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati nel File del Paziente (cartella).

Paziente in Cura
Apri la cartella di un Paziente in cura. Prosegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati aggiungendoli al File del Paziente (cartella) selezionato.

Apri una Nuova Esercitazione
Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Il nuovo esercizio può essere memorizzato per future consultazioni.

Apri una Esercitazione Esistente
Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Apre un esercizio esistente per aggiornamenti e studio.

Consulto Rapido
Diagnostica diretta per una rapida consultazione. Questa Funzione non memorizza alcun dato.

Gestione Files Pazienti o Esercitazioni
Salvataggio / ripristino dei File Paziente o delle Esercitazioni. Display, stampa, salvataggio di singoli File del Paziente o Esercitazioni.

Chiudi **Termina il Programma**

Seguiamo ora la funzione che apre una Esercitazione Esistente.
Invio per la slide seguente

Esercitazione Esistente apre lo schermo contenente la lista delle esercitazioni fatte. La sequenza operativa è elencata di seguito.

- 1) Si evidenzia l'Esercitazione interessata.
- 2) Si seleziona l'Esercitazione interessata.
- 3) Si apre il file dell'Esercitazione

Lista Esercitazioni :		
0403-ESE1	M	Esercizio 1
0403-ESE2	F	Esercizio 2
0403-ESE3	M	Esercizio 3
0403-ESE4	F	Esercizio 4
0403-ESE5	M	Esercizio 5
0403-ESE6	M	Esercizio N^ 6
0403-ESE7	M	Esercitazione di prova
0403-ESE8	F	Esercitazione di prova

Codice File Esercitazione selezionato:
0403-ESE8

Apri File Esercitazione selezionato

Aperto File Esercitazione 0403-ESE8

Continua >>
Mostrami prima il File Esercitazione selezionato

Continua >>
Vai direttamente allo schermo Input Sintomatologici

<< Torna a Menu Iniziale

ottenendone il **messaggio di conferma**

- 4) Si può ora vedere il File Esercitazione prima di continuare con lo schermo Input Sintomatologici

- 5) Oppure andare direttamente allo schermo Input Sintomatologici


Questo pulsante annulla l'operazione e torna al Menu Iniziale

Immaginiamo di fare click sul pulsante ' Continua >> Mostrami prima il File Esercitazione selezionato '.

Invio per la slide seguente

La funzione **Esercitazione Esistente**

Lo schermo del file *Esercitazione* e relativo codice

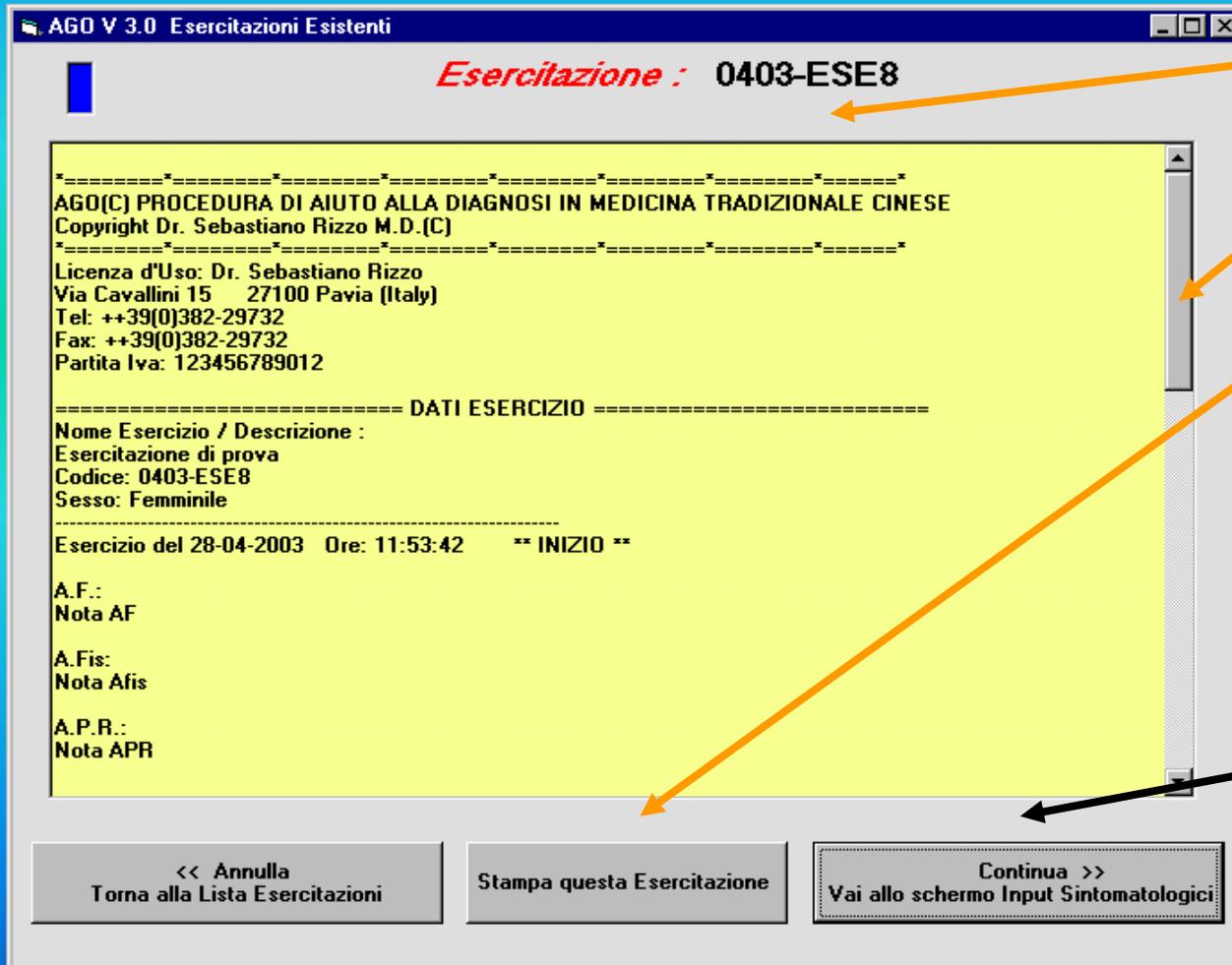

In questa finestra viene mostrato il File Esercitazione. Agendo sulla barra di scorrimento lo si può leggere interamente.

Lo si può anche stampare.

Per proseguire si fa click sul pulsante ' Continua >> Vai allo schemo Input Sintomatologici '.

La prossima slide mostrerà il proseguimento completo della funzione.

Invio per la slide seguente

La funzione

Consulto Rapido

Invio per la slide seguente

La funzione **Consulto Rapido**

Lo schermo *Menu Iniziale*



La funzione **Consulto Rapido** permette di accedere direttamente allo schermo **Inputs Sintomatologici** per una veloce comparazione della propria diagnosi.

E' come avere un collega al fianco con cui consultarsi.

Percorso Verde

Nella prossima Slide vedremo la sequenza completa della funzione **Consulto Rapido**.

Invio per la slide seguente

La funzione **Consulto Rapido**

La sequenza degli schermi



Inputs Sintomatologici

I risultati della diagnosi

La logica diagnostica e le opzioni possibili sono le stesse di quelle che avete visto illustrate per le funzioni Nuovo Paziente e Esercitazione.




La sequenza 1, 2, 3, 4, 5 le mostra nel loro svolgimento.

Ritorno ai Risultati e termine diagnosi

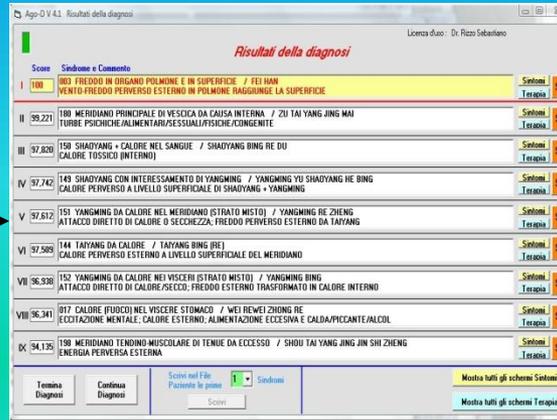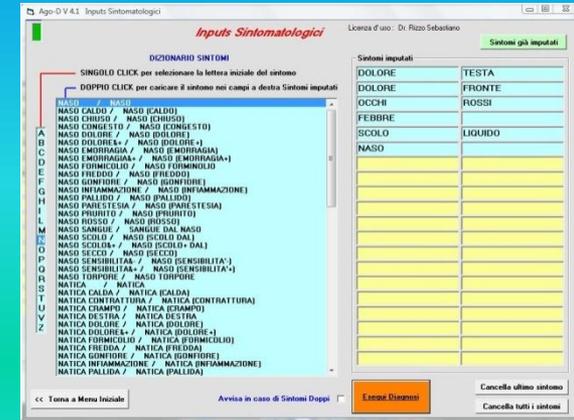

I sintomi

La terapia

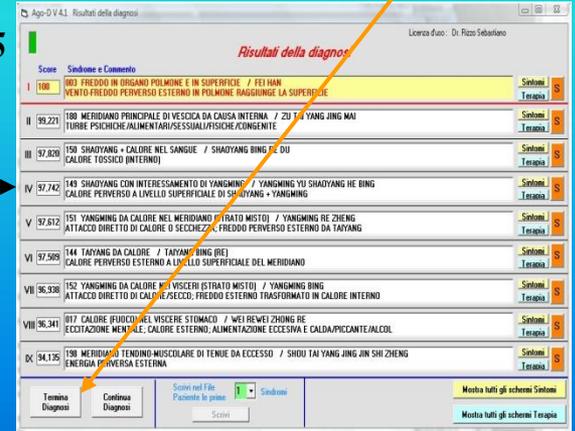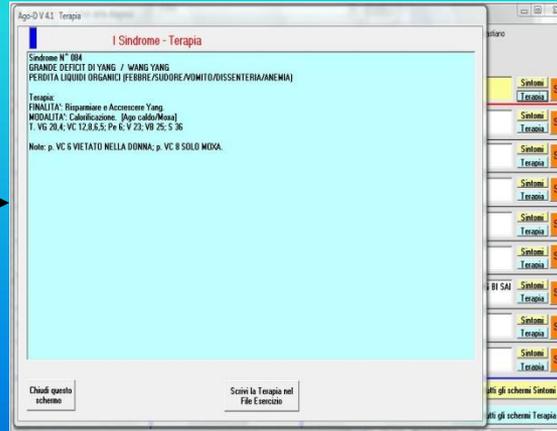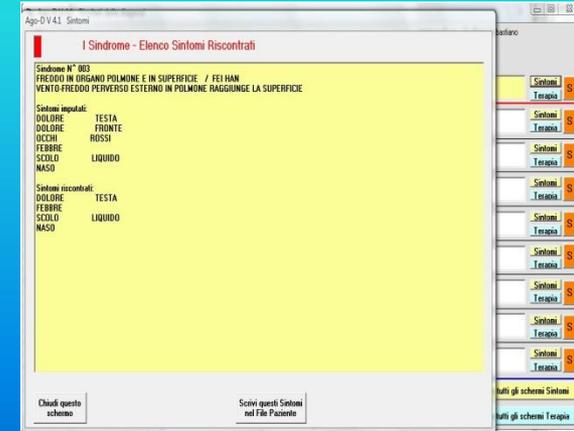

(Si possono ovviamente vedere anche tutti gli schermi Sintomi e Terapia sovrapposti)

Invio per la slide seguente

La funzione

Gestione Files

Invio per la slide seguente

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Menu Iniziale*

Menu Iniziale Licenza d'uso : Dr. Sebastiano Rizzo

Nuovo Paziente
Attiva la cartella di un nuovo Paziente. Esegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati nel File del Paziente (cartella).

Paziente in Cura
Apre la cartella di un Paziente in cura. Prosegue la Procedura diagnostica. Memorizza i risultati aggiungendoli al File del Paziente (cartella) selezionato.

Esercitazioni

Esercitazione Esistente
Funzione per esercitazioni, studio e ricerca. Apre un esercizio esistente per aggiornamenti e studio.

Consulto Rapido
Diagnostica diretta per una rapida consultazione. Questa Funzione non memorizza alcun dato.

Gestione Files
Salvataggio / ripristino dei File Paziente o delle Esercitazioni. Display, stampa, salvataggio di singoli File del Paziente o Esercitazioni.

Chiudi **Termina il Programma**

Esegue il salvataggio dei files su Floppy Disk, permette consultazioni, stampa etc dei file Paziente e Esercitazioni

Percorso Giallo


Seguiamo ora la funzione Gestione Files.

Invio per la slide seguente

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files*

L'etichetta gialla del percorso Gestione Files

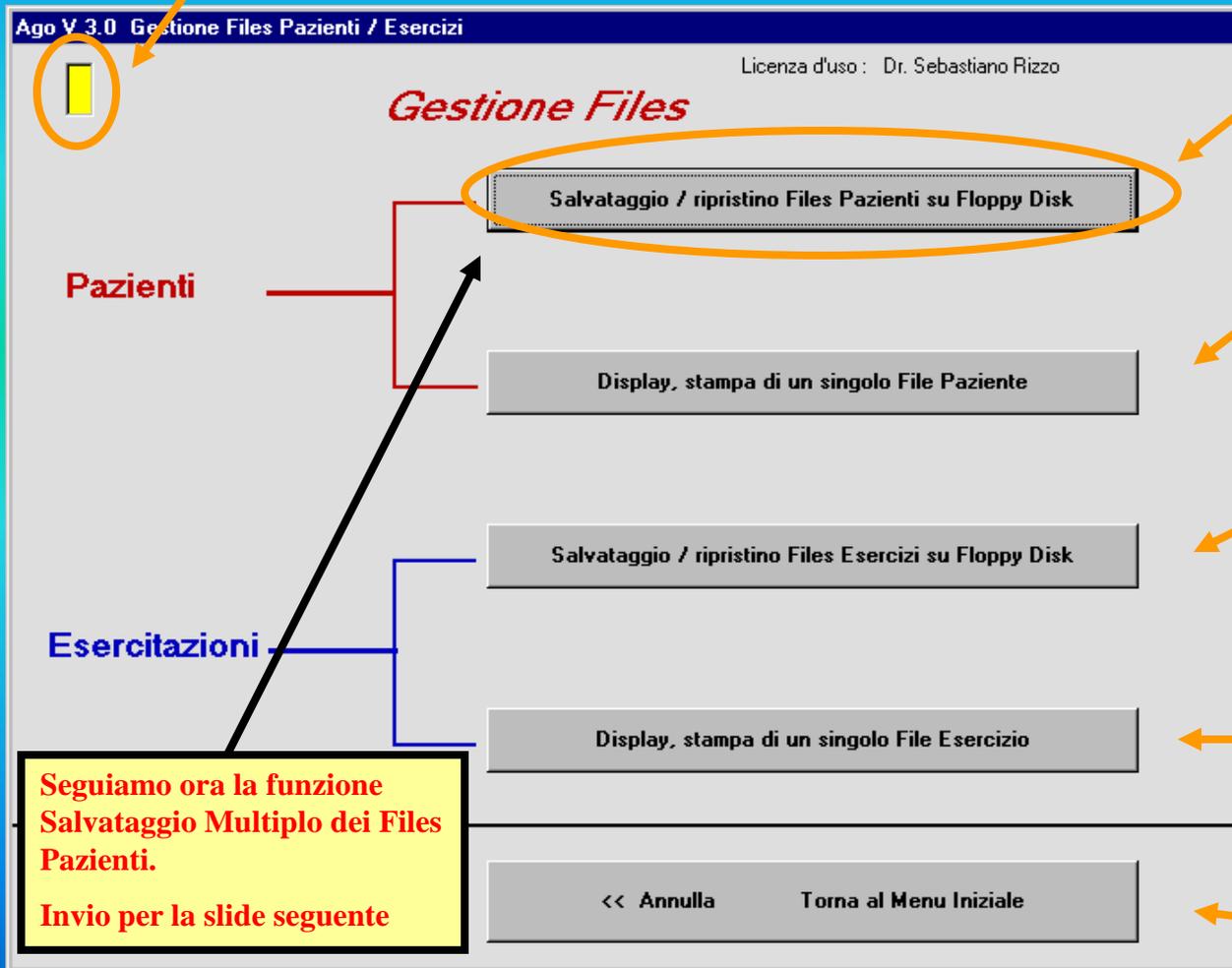

Esegue il salvataggio o il ripristino dei Files Pazienti su e da Floppy Disk.

Esegue il display del singolo File Paziente, la sua stampa e il salvataggio su Floppy Disk.

Esegue il salvataggio o il ripristino dei Files Esercizi su e da Floppy Disk.

Esegue il display del singolo File Esercizio, la sua stampa e il salvataggio su Floppy Disk.

Torna al Menu Iniziale

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo **Salvataggio / Ripristino Files Pazienti**

Lo schermo è diviso in due parti. La parte superiore è dedicata al Salvataggio dei Files Pazienti su un Dispositivo Esterno come ad esempio una penna USB.

Seguire i punti 1 e 2.

La parte inferiore è dedicata al ripristino su Hard Disk dei Files Pazienti salvati in precedenza sul Dispositivo Esterno.

Seguire i punti 1, 2 e 3.

Si può annullare l'operazione di salvataggio e tornare a Gestione Files

Oppure

Tornare al Menu Iniziale

Torniamo allo schermo Gestione Files per seguire con la seconda funzione.

Invio per la slide seguente

Salvataggio / Ripristino dei Files Pazienti Licenza d'uso : Dott. Rizzo Sebastiano

**** Salvataggio sul Dispositivo Esterno.** Es: chiavetta USB, Dischi Esterni, Floppy Disk etc..

IMPORTANTE: Si raccomanda di usare sempre lo stesso Dispositivo Esterno per le copie di salvataggio al fine di evitare di avere più copie diverse dei Files Pazienti. Es: la stessa chiavetta USB o lo stesso Floppy Disk etc.. E' consigliato eseguire la funzione di salvataggio al termine di ogni sessione di utilizzo del programma AGO.

1) Seleziona il Dispositivo Esterno

2) Fai Click sul pulsante ' Esegui Salvataggio '. Sul Dispositivo Esterno selezionato verrà automaticamente creata la cartella ' SalvataggioFilesPazienti ' dove verranno copiati tutti i Files Pazienti presenti sull ' Hard Disk.

3) Seleziona il Dispositivo Esterno

2) Fare doppio click sulla cartella ' SalvataggioFilesPazienti '.


3) Fai Click sul pulsante ' Esegui Ripristino '. Tutti i Files Pazienti presenti sul Dispositivo Esterno verranno copiati sull' Hard disk nella cartella di AGO.

<< Torna al Menu Iniziale

<< Annulla Torna a Gestione Files

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files*

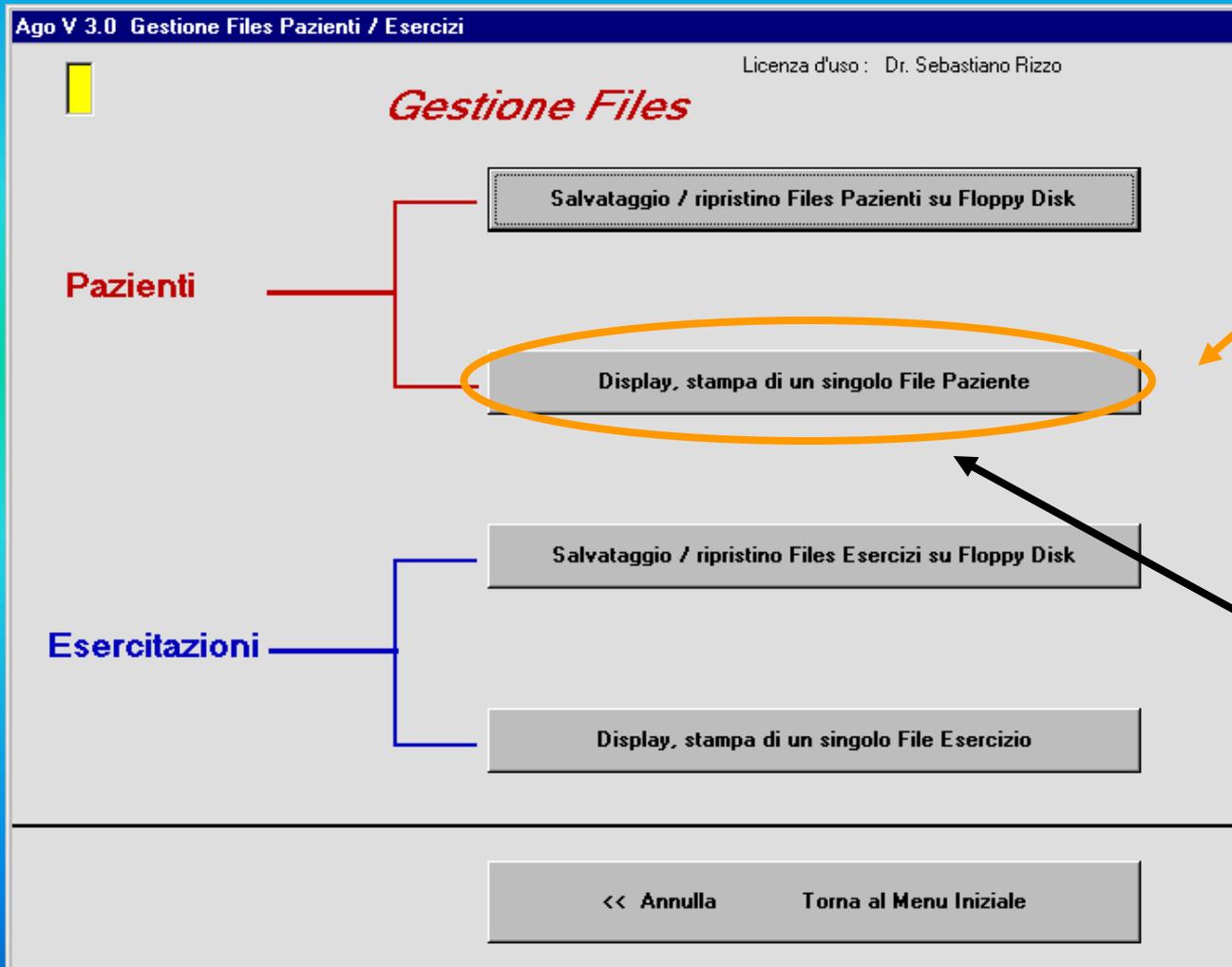

Esegue il display del singolo File Paziente, la sua stampa e il salvataggio su Floppy Disk.

Seguiamo ora la funzione Display, stampa, salvataggio di un singolo File Paziente.
Invio per la slide seguente

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

I criteri di ricerca permettono di ottenere:

- lista completa dei Files
- lista completa dei Files Pazienti divisi per sesso
- liste divise per sesso, mese, anno

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files Pazienti – Ricerca Files*

La sequenza operativa è:

1) Impostare i criteri di ricerca e attivarla (Click su Cerca)

(Reset annulla la ricerca)

2) Evidenziare quello interessato

3) Selezionarlo

4) Aprirlo ottenedone il messaggio di conferma

5) Vedere il File selezionato per poi operarci

Si può annullare l'operazione oppure

Tornare al Menu Iniziale

AGO V 3.0 Gestione File Paziente

Gestione Files Pazienti - Ricerca Files

Tutti
Files per Sesso Mese Anno Sesso

Criteri di ricerca >> M+F oppure Tutti 2003 M+F

Cerca
Reset

Files Pazienti trovati N^ : 5

0403-PAT1	F	Primo	Anna	Via Roma 66
0403-PAT2	M	Secondo	Giacomo	Via Carducci 8
0403-PAT3	F	Terzo	Fabia	Via Lorientto 9
0403-PAT4	M	Quarto	Giuseppe	Via Napoli 9
0403-PAT5	M	Quinto	Dario	Via Tonale 6

Codice File Paziente selezionato: 0403-PAT5

Apri File Paziente selezionato

Aperto File Paziente 0403-PAT5

Continua >> Mostrami il File Paziente selezionato

<< Annulla Torna a Gestione Files


<< Torna a Menu Iniziale

Nella prossima slide viene mostrato il File Paziente selezionato.

Invio per la slide seguente

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files*

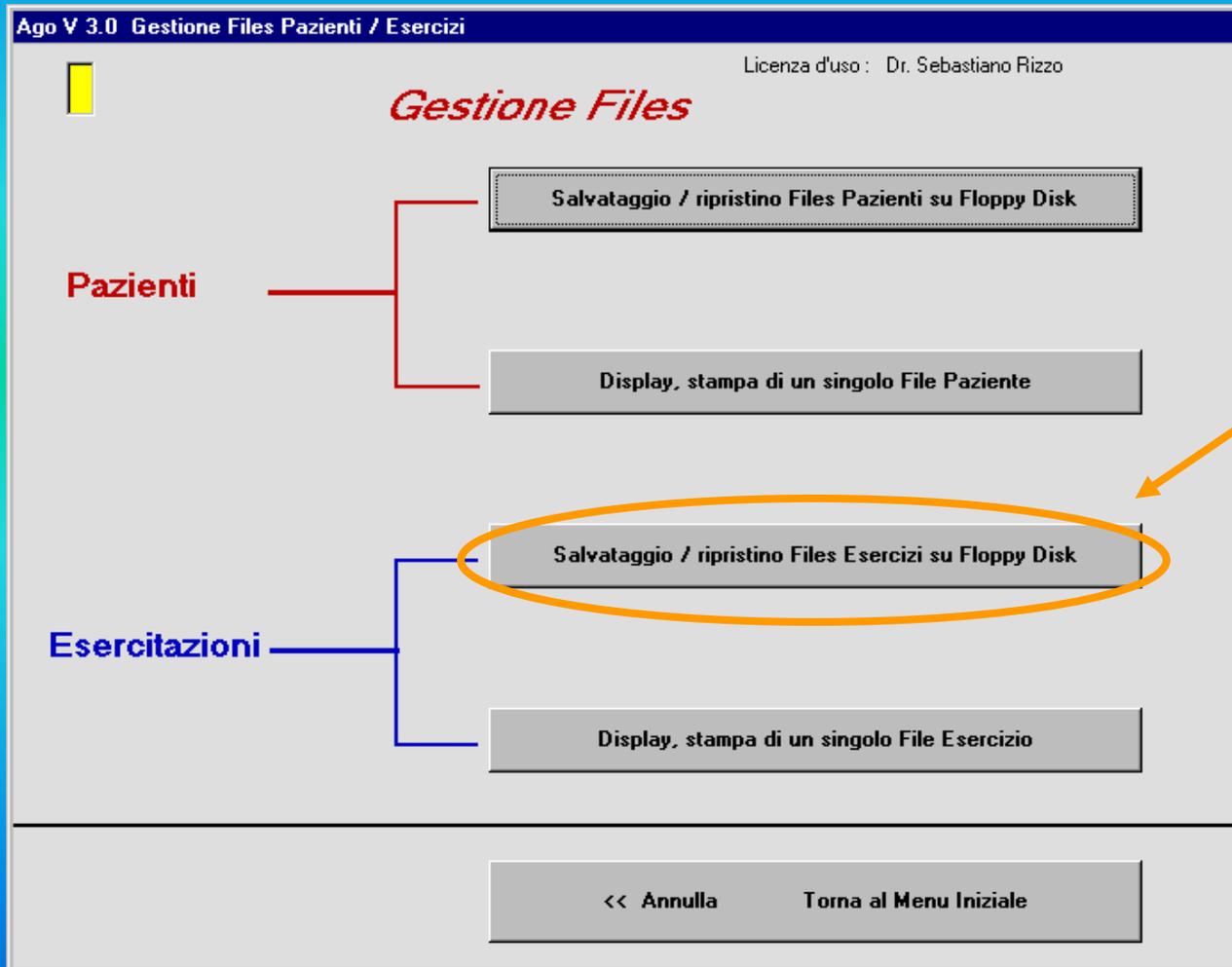

Seguiamo ora la funzione che esegue il salvataggio e Ripristino dei Files Esercizi su e da Floppy Disk.

Invio per la slide seguente

Lo schermo è diviso in due parti. La parte superiore è dedicata al Salvataggio dei Files Esercizi su un Dispositivo Esterno come ad esempio una penna USB.

Seguire i punti 1 e 2.

La parte inferiore è dedicata al ripristino su Hard Disk dei Files Esercizi salvati in precedenza sul Dispositivo Esterno.

Seguire i punti 1, 2 e 3.

Si può annullare l'operazione di salvataggio e tornare a Gestione Files

Oppure

Tornare al Menu Iniziale

Torniamo allo schermo Gestione Files per seguire con la seconda funzione.

Invio per la slide seguente

Lo schermo **Salvataggio / Ripristino Files Esercizi**

Licenza d'uso : Dott. Rizzo Sebastiano

Salvataggio / Ripristino dei Files Esercizi

**** Salvataggio sul Dispositivo Esterno.** Es: chiavetta USB, Dischi Esterni, Floppy Disk etc..

IMPORTANTE: Si raccomanda di usare sempre lo stesso Dispositivo Esterno per le copie di salvataggio al fine di evitare di avere più copie diverse dei Files Esercizi. Es: la stessa chiavetta USB o lo stesso Floppy Disk etc.. E' consigliato eseguire la funzione di salvataggio al termine di ogni sessione di utilizzo del programma AGO.

1) Seleziona il Dispositivo Esterno

2) Fai Click sul pulsante ' Esegui Salvataggio '. Sul Dispositivo Esterno selezionato verrà automaticamente creata la cartella ' SalvataggioFilesEsercizi ' dove verranno copiati tutti i Files Pazienti presenti sull ' Hard Disk.


3) Fai Click sul pulsante ' Esegui Ripristino '. Tutti i Files Esercizi presenti sul Dispositivo Esterno verranno copiati sull' Hard disk nella cartella di AGO.

<< Torna al Menu Iniziale

<< Annulla Torna a Gestione Files

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files*

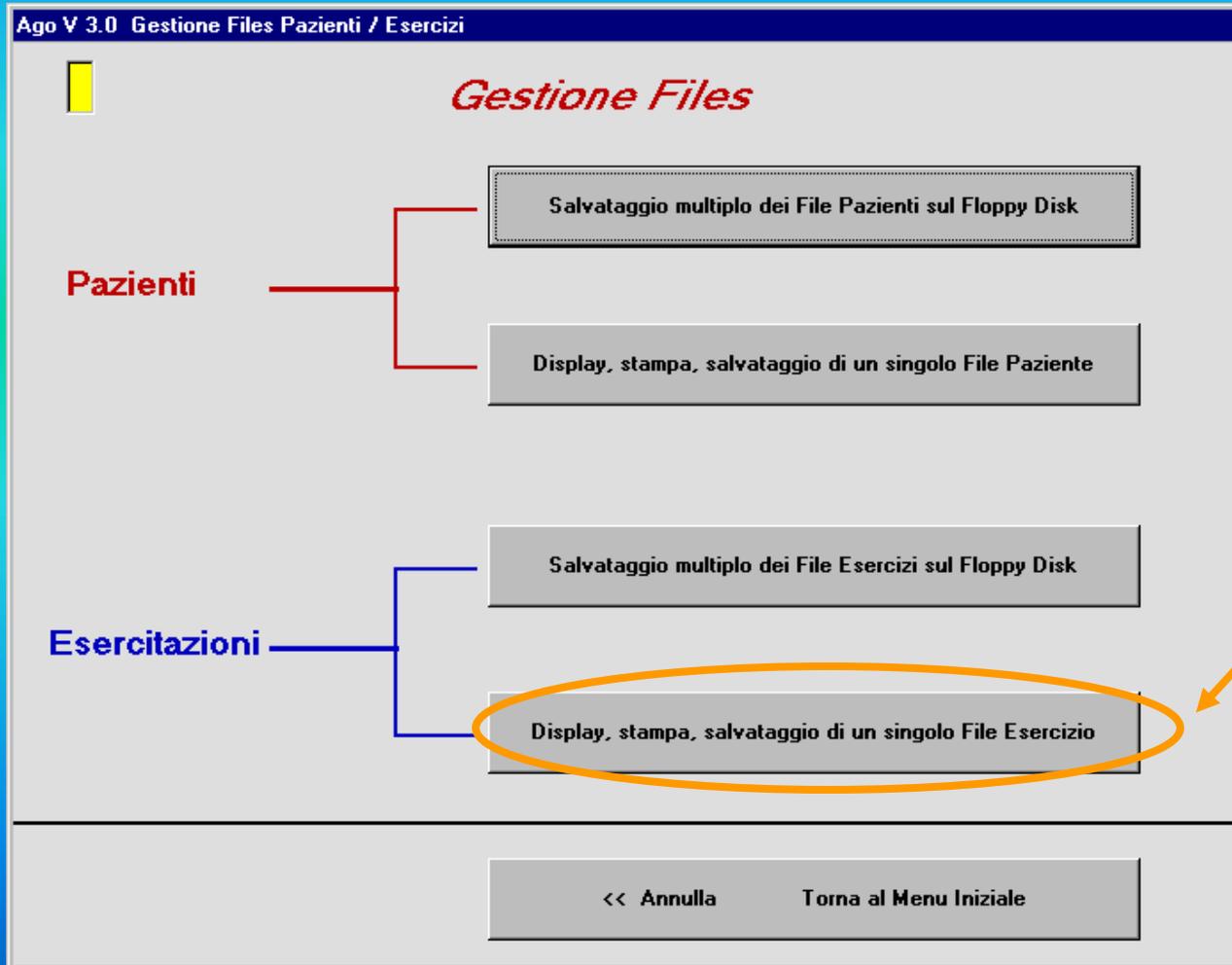

Esegue il display del singolo File Esercizio, la sua stampa e il salvataggio su Floppy Disk.

Invio per la slide seguente

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

I criteri di ricerca permettono di avere:

- lista completa dei Files
- lista completa dei Files Pazienti divisi per sesso
- liste divise per sesso, mese, anno

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Gestione Files Esercitazioni – Ricerca Files*

La sequenza operativa è:

1) Impostare i criteri di ricerca e attivarla (Click su Cerca)

(Reset annulla la ricerca)

2) Evidenziare quello interessato

3) Selezionarlo

4) Aprirlo ottenedone il messaggio di conferma

5) Vedere il File selezionato per poi operarci

Si può annullare l'operazione oppure

Tornare al Menu Iniziale

AGO V 3.0 Gestione File Esercitazioni

Gestione Esercitazioni - Ricerca Files

Tutti i Files per Sesso oppure Mese Anno Sesso

Criteri di ricerca >> M+F oppure Tutti 2003 M+F Cerca

Reset

Files Esercitazioni trovate N^: 8

0403-ESE1	M	Esercizio 1
0403-ESE2	F	Esercizio 2
0403-ESE3	M	Esercizio 3
0403-ESE4	F	Esercizio 4
0403-ESE5	M	Esercizio 5
0403-ESE6	M	Esercizio N^ 6
0403-ESE7	M	Esercitazione di prova
0403-ESE8	F	Esercitazione di prova

Codice Esercitazione selezionata: 0403-ESE8

Apri il File Esercitazione selezionata

Aperto File Esercitazione 0403-ESE8

Continua >> Mostrami il File Esercitazione selezionato

<< Annulla Torna a Gestione Files

<< Torna a Menu Iniziale

La funzione **Gestione Files**

Lo schermo *Esercitazione selezionata* e relativo codice

In questo schermo è possibile:

Salvare questo File Esercitazione su Floppy Disk

Stampare questo File Esercitazione

Annullare l'operazione tornando allo schermo Gestione File

Invio per la slide seguente

Ago V 3.0 Esercitazione selezionata

Esercitazione selezionata : 0403-ESE8

-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
AGO(C) PROCEDURA DI AIUTO ALLA DIAGNOSI IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Copyright Dr. Sebastiano Rizzo M.D.(C)
-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*

Licenza d'Uso: Dr. Sebastiano Rizzo
Via Cavallini 15 27100 Pavia (Italy)
Tel: ++39(0)382-29732
Fax: ++39(0)382-29732
Partita Iva: 123456789012

===== DATI ESERCIZIO =====

Nome Esercizio / Descrizione :
Esercitazione di prova
Codice: 0403-ESE8
Sesso: Femmine

Esercizio del 28-04-2005 Ore: 11:53:42 ** INIZIO **

A.F.:
Nota AF

A.Fis:
Nota Afis

A.P.R.:
Nota APR

<< Annulla
Torna a Gestione File Paziente


Stampa questa Esercitazione

Salva questa Esercitazione su Floppy Disk

AGO-D V 4.1 *for Windows platform*

Diagnostica Agopuntorea Computerizzata

Copyright Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

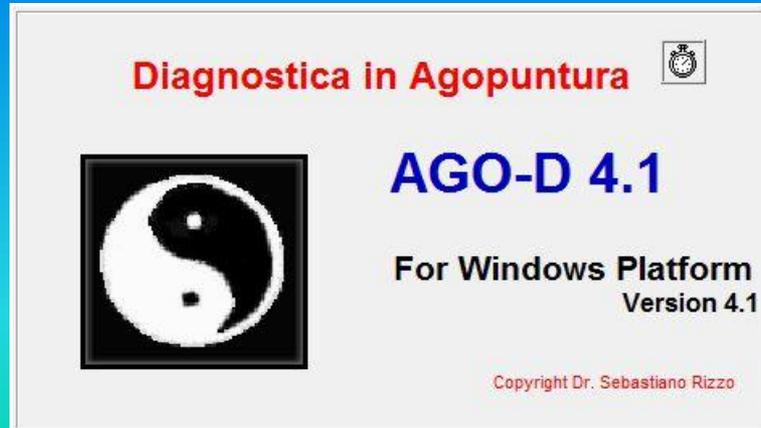

Software medico per l'Agopuntura

**Nuova Versione AGO-D V 4.1
per piattaforme Windows.**

**Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete contattarmi
per commenti, chiarimenti o ordini all' indirizzo :**

riseb@libero.it

Dr. Sebastiano Rizzo MD, CA

**Nelle prossime 2 slides ho
riportato il sunto del mio
curriculum vitae**

SEBASTIANO RIZZO, medico chirurgo, pneumologo, specialista in Patologia Clinica, Medicina del Lavoro, Oncologia.

FORMAZIONE IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Diplome de Medicine Acupuncteur (delivréé par la Société Internationale d'Acupuncture; Paris 1976 (corso triennale) - Diploma del Corso Triennale di Agopuntura presso Centro Studi SoWen (Milano 1976) - Certificate (Diploma Universitario) di Medico Agopuntore (Harbin, R.P. di Cina,1984).

ATTIVITA' DIDATTICA (passata/presente)

Docente seminariale e professore a contratto presso la Scuola Italiana di Agopuntura e l'Università di Pavia.

SOCIETA' MEDICO-SCIENTIFICHE (passato/presente)

SIA. - ALMA - AIAM - ACCP - NYAS

INCARICHI IN SOCIETA' SCIENTIFICHE

Institute International pour la Recherche et le Developpement des Systemes Informatifs en Biologie (Vicepresidente) - Responsabile della Segreteria Scientifica dell'A.I.A.M., per il Convegno Medico "Rapporto sul I° Congresso Mondiale del WFAS", Milano, 2 dicembre 1988.

ATTIVITA' SCIENTIFICA

Circa 200 pubblicazioni su riviste/atti italiani e internazionali. Relatore in congressi nazionali ed internazionali (bibliografia selezionata):

- Proposta di standardizzazione dei risultati in Agopuntura. Riv. Ital. Agop. 34,37,1979.**
- Le urgenze respiratorie in Agopuntura. Atti del 6th Congress of the World Scientific Union of Acupuncture, Firenze, June 25-29.1980 (Relazione).**
- Computer e Agopuntura : il progetto AGO. Orientamenti M.T.C. 4,310,1988.**
- Un sistema esperto per la Medicina Tradizionale Cinese. NATOM 67:6,1990.**

Invio per la slide seguente

- **Aspetti anatomici ed energetici della lingua. NATOM 67s:6,1990.**
 - **Sull'esperienza dell'insegnamento dell'Agopuntura all'Università di Pavia. Atti del Convegno Internazionale Preparatorio dell'Atelier Europeo di Agopuntura. Roma, 2 marzo 1990.**
 - **Acupuncture's scientificity and western medical culture. In: Proceedings of the Forum on Non-Conventional Medicines and the Acupuncture European Workshop. Council of Europe and WHO, Paracelso ed., Rome 25-27 october 1990.**
 - **Rizzo. DeQi, Propagated sensation along meridians (PSM) and Responses to Acupuncture Therapy. 2nd World Conference on Acupuncture-Moxibustion, Paris, December 5-8, 1990.**
 - **S. Rizzo. L'Agopuntura in Italia negli ultimi due secoli. Orientamenti MTC 1991;3:204-210.**
 - **S. Rizzo. L'Agopuntura Tradizionale Cinese nel trattamento del tabagismo. Emedocle 1991;29:33.**
- Rizzo. Agopuntura: pratica, diritto e deontologia. Medicina Naturale 4:52-54,1991.**
- **What a medical data base can tell about Acupuncture. WFAS International Symposium on the trend of research in Acupuncture. Rome 22-24 october 1992.**
 - **Scientific works on Acupuncture: a comparison between two years of a medical data base. WFAS International Symposium on the trend of research in Acupuncture. Rome 22-24 october 1992.**

REALIZZAZIONI DI PROGETTI DI RICERCA E APPLICATIVI

"AGO", un Sistema Esperto Computerizzato di Diagnostica in Medicina Tradizionale Cinese con annessi schemi di Terapia. Il Sistema raccoglie 358 Sindromi codificate secondo la MTC con relativi schemi terapeutici.

"Prevenzione con agopuntura di nausea e vomito nella chemioterapia antiblastica del tumore del polmone". Progetto di studio osservazionale (Cod. 5) approvato dalla Direzione Generale di Sanità della Regione Lombardia nell'ambito del programma "Osservazione e valutazione di procedure terapeutiche di medicina complementare: indicazioni per la stesura dei progetti".